

Prophy Unit

Pieskovací násadec na odstraňovanie povlakov

Návod na použitie:

Pieskový násadec Prophy Unit sa používa na čistenie zubov od povlakov.

Pri práci doporučujeme lekárovi a pacientovi použiť ochranné okuliare.

Upozornenie:

Pacientom, ktorí trpia chronickou bronchitídou alebo astmou sa nedoporučuje vykonávať túto liečebnú procedúru. Pacientom, ktorí užívajú soľ v limitovanom množstve sa takisto nedoporučuje vykonávať túto procedúru z dôvodu obsahu látky sodium bicarbonate v čistiacom prášku.

Použitie:

1. odkryť vrchný kryt, preveriť či je zásobník prázdny.
2. nasypať prášok približne do polovice zásobníky a zavrieť zásobník
3. tlak v vzduchu a vody by mal byť: - voda 0,2 – 0,4 MPa
- vzduch 0,3- 0,4 MPa
4. Prístroj sa uvádza do prevádzky pomocou nožného spínača. Pri práci má byť koncovka vzdialená 3-5 mm od zubov pacienta pod uhlom 30 – 60 stupňov. Čím väčší je uhol, tým väčšia plocha sa čistí. Doporučujeme vykonávať malé krúživé pohyby.
5. Po ukončení procedúry je potrebné, aby si pacient vypláchol ústnu dutinu.

Čistenie a sterilizácia:

Všetky časti násadca odporúčame utrieť hladkou útierkou. Po skončení pracovného dňa je potrebné očistiť zásobník od zvyškového piesku, ktorý v prípade neodstránenia môže nasať vlhkosť a upchať trysku. Po odstránení zvyškového piesku odskrutkovať násadec zo súpravy a niekoľkokrát zopnúť nožný spínač, čím prečistíme vzduchové cesty, ktoré sa používajú pri práci.

Pieskovací násadec je možné sterilizovať 20 minút pri teplote 121⁰C .

EUR  **DENT**

**Tigria 10
040 01 Košice**

**0903 774 933, 0915 914 038
E-mail: eurodent@t-zones.sk**